

# INMOVILIZADOR ORTOPÉDICO DE CABEZA



DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA **EVITAR LA FLEXIÓN LATERAL Y MOVIMIENTOS ROTACIONALES** DE LA CABEZA DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE.

## Instrucciones de uso

1. Desprenda la correa que se encuentra en la parte posterior de la base del inmovilizador, e insértela en las dos azas superiores de la camilla.
2. Adhiera el inmovilizador a la correa que ubicó en la camilla.
3. Despegue los paneles laterales del inmovilizador y centrellos a la medida de la cabeza del paciente, dejando las orejas ubicadas en cada orificio lateral, para controlar el monitoreo del canal del oído.
4. Ajuste las 2 correas frontales según la medida de la cabeza del paciente para evitar movimientos innecesarios.



**IMPORTANTE CUMPLA CON LA NORMA DE PRIMEROS AUXILIOS**

Resolución 705 de 2017 – Ley 1209 de 2008



### Características

- Amplios beneficios para controlar el canal del oído del paciente.
- Fabricado en espuma de alta densidad.
- Sirve para rescate terrestre o acuático.
- Dos correas sujetadoras en mentón y frente, con cierre en velcro para un rápido y fácil ajuste a la camilla.



PBX: (57 - 1) 298 4725 Cel: 315 229 3313



ventas@dipingenieria.co

www.dipingenieria.co

Calle 23 No. 102-28  
Bogotá D.C - Colombia

**IMPORTANTE CUMPLA CON LA NORMA DE PRIMEROS AUXILIOS**

Resolución 705 de 2017 – Ley 1209 de 2008